

## SILIKONSCHAUMVERBAND MIT HAFTRAND, 10x10 cm · steril


**Beschreibung:** Der Silikonschaumverband besteht aus medizinischem, aufgeschäumtem Polyurethan. Die poröse Struktur verhilft ihm zu mehr und schnellerer Saugfähigkeit. Nach der Absorption von Exsudaten wird ein feuchtes Milieu an der Wundoberfläche aufrecht erhalten, das die Bildung von Granulationsgewebe und Epithelisierung begünstigt. Der Silikonschaumverband ist weich und elastisch und verringert den Druck auf die Wunde. Der Silikonschaumverband besteht aus einer weichen Silikonschicht mit Wundkontakt, einer flexiblen saugfähigen Unterlage aus drei Schichten (Polyurethanschaum, Vliesstoff und superabsorbierende Polyacrylatfasern) und einer äußeren dampfdurchlässigen, wasserdichten Folie.



**Indikationen:** Der Silikonschaumverband ist für eine Vielzahl exsudierender Wunden wie Druckgeschwüre, Bein- und Fußgeschwüre und traumatische Wunden, z.B. Hautrisse und chirurgische Wunden, bestimmt.

**Kontraindikationen:** Verwenden Sie das Produkt nicht bei infizierten Wunden, wenn Rötungen oder allergische Symptome erscheinen, wenn die Wunde durch Blutversorgungsmangel oder diabetisches Fußgeschwür verursacht ist. Täglich Zustand der Wunde überprüfen.

**Gebrauchsanweisung:** Stellen Sie sicher, dass die Wunde gereinigt und die umliegende Haut trocken ist. Der Silikonschaumverband sollte mindestens 2 cm über die Wunde hinaus gehen. Entfernen Sie die Trennfolien und kleben Sie die haftende Seite ohne Dehnung auf die Wunde.

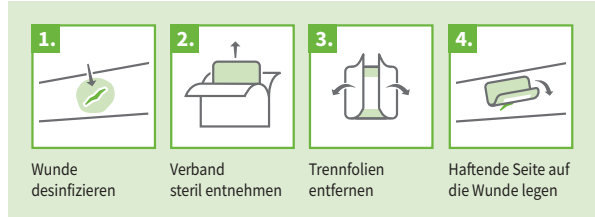


**Wechselhäufigkeit:** Das Intervall der Verbandwechsel hängt vom Grad der Exsudation ab. Der Silikonschaumverband kann bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben.

**Lagerung:** Temperatur: 5 bis 35 °C. Trocken und dunkel. Keine korrosiven Gase.

**Verwenden Sie das Produkt nicht wieder! Sterilisieren Sie das Produkt nicht erneut!**  
**Der Silikonschaumverband wurde mit Bestrahlung sterilisiert.**  
**Wenn die Verpackung beschädigt ist, das Produkt nicht verwenden oder erneut sterilisieren.**

PZN 19223033 (VE 10 Stück)

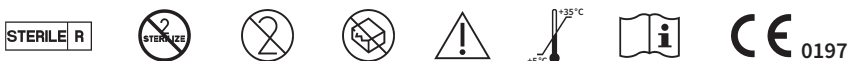

**Roosin Medical Co., Ltd.** [EC REP] **Prolinx GmbH** · Brehmstr. 56 · 40239 Düsseldorf · GERMANY

Vertrieb: **1A+A+Wundprodukte GmbH** · Aplerbecker Str. 69 · 40472 Düsseldorf · Deutschland  
[www.1a-a-a-wundprodukte.de](http://www.1a-a-a-wundprodukte.de)