

SUPERABSORBIERENDE WUNDAUFLAGE, 10x10 cm · steril

Beschreibung: Die Wundauflage zeichnet sich durch gute Permeabilität und hohe Flüssigkeitsaufnahme-fähigkeit aus. Sie absorbiert Wundexsudat, um das Mazerationsrisiko zu senken, und sorgt gleichzeitig für ein feuchtes Wundmilieu.


Indikationen: Die Wundauflage eignet sich zur Abdeckung chronischer und nicht chronischer Wunden (z. B. oberflächliche Wunden, postoperative Nahtwunden, mechanische Wunden, kleine Wunden und Schürfwunden) und schafft eine Mikroumgebung für die Wundheilung. Die Wundauflage kann als Primär- und Sekundärverband verwendet werden.

Kontraindikationen: Verwenden Sie das Produkt nicht bei infizierten Wunden, wenn Rötungen oder allergische Symptome erscheinen.

Gebrauchsanweisung: Stellen Sie sicher, dass die Wunde gereinigt und die umliegende Haut trocken ist. Entnehmen Sie die Wundauflage und legen Sie sie mit der weißen Seite auf die Wunde. Achten Sie darauf, dass die Wundauflage an allen Seiten ausreichend über den Wundrand hinaus geht. Falls erforderlich mit einem Sekundärverband fixieren.

Wechselhäufigkeit: Das Wechselintervall hängt vom Grad der Exsudation ab. Die Wundauflage kann bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben. Die kontinuierliche kumulative Nutzungsdauer darf 30 Tage nicht übersteigen.

Lagerung: Bei Zimmertemperatur, gut belüftet, trocken und dunkel.

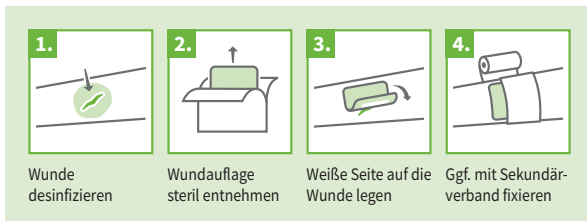

Die Wundauflage wurde mit Bestrahlung sterilisiert.

Verwenden Sie das Produkt nicht wieder.

Das Produkt nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.

Nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

PZN 20623393 (VE 10 Stück)



Roosin Medical Co., Ltd. **EC REP** **Prolinx GmbH** · Brehmstr. 56 · 40239 Düsseldorf · GERMANY

Vertrieb: **1A+A+ Wundprodukte GmbH** · Aplerbecker Str. 69 · 40472 Düsseldorf · Deutschland
www.1a-a-a-wundprodukte.de